

②9ポータブルトイレ

要配慮者スペース等で使用する
介護用の簡易トイレです。
使用時は、便器のバケツに便袋
をつけて、使用します。



○組み立てと収納について

箱を開くと、右のように商品
が梱包されています。
便座の蓋を開けると①のとおり
説明書があります。
便器内には②のとおり、付属品
があります。
まず初めに、説明書や付属品を
取り出してください。
組み立てにあたり、付属品の袋
から③の部品を取り出して、用
意してください。



①



②



③



(左からトイレットペーパー置き、
背もたれ固定ピン×2)

本体を取り出すと、右のように底に背もたれと手すりがあります。
組み立ては以下の写真の順に組み立ててください。



①背もたれをはめ込む



②背もたれをピンで固定する



③手すりをはめ込む



④手すりの固定ピンを横に回して固定する



⑤両側の手すりを固定する



⑥トイレットペーパー置き付けて組み立て完了



※収納時は、上記の手順を逆に行ってください。

箱に収納する時は、手すりと背もたれを写真の形で収納してください。

その際、箱の四隅の●部分に、本体の足部分を収納できるスペースを作ってください。

