



④肘掛付簡易トイレセット

(処理袋 25 枚付)


お年寄りにも使い易い肘掛付きです。

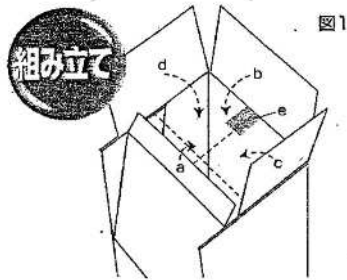


① 便器Aを広げ逆にしA底部aを内側に折り曲げ、次にb, c, dを順番に内側に折り曲げた後シールFをe部に貼る

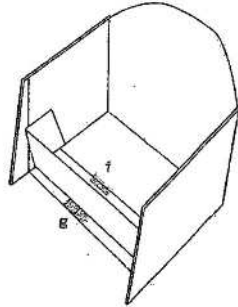


② 便器Aを正常に立て、ab部の接点f部とg部にシールFを貼る

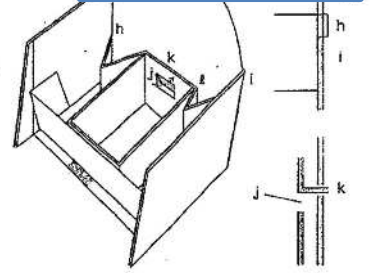


③ 内枠Bを広げ、反対に折り、折りグセをとり、便器にセットする。背面h, iにBの凸部を差し込む。次に開口部jを外に折り、小穴kに差し込みA, Bを固定する

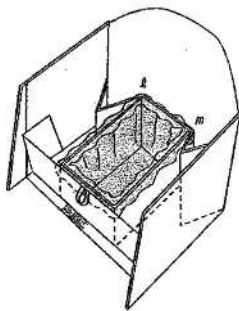

④ 蓄便袋Gを内枠Bの切込み部l, m部に差し込みBの上側を覆うようにセットする

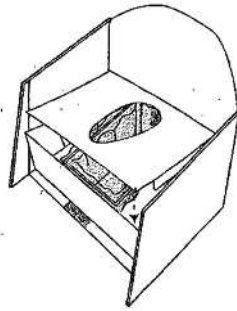


⑤ 便座Cの両サイドの折れ線を折り便器Aに接する内枠Bの両サイドに乗せる様にセットする

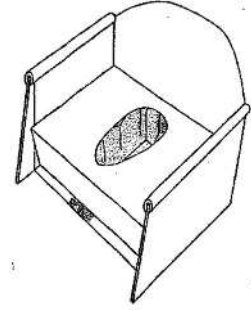


⑥ ひじかけEを便器Aの上部両サイドにセットする

使用方法

① 用便後分包袋を開封し、便凝固剤(H)を便にふりかける。使用しない時は便蓋(D)をする。

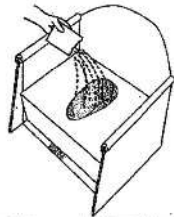

② 蓄便袋のヒモでしっかり結び、便器より取り出す。

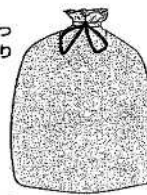


使用後の処理

① 持ち運び袋に入れてお持ち帰り下さい。


② 凝固した便を水洗トイレで流して下さい。

③ 不要になった時は、地方自治体の条例に基づいて処分して下さい。*段ボール便器は再生紙に利用出来ます。

セット部品とセット数

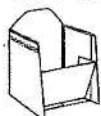

便器(A) 1

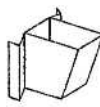

内枠(B) 1



便座(C) 1



便蓋(D) 1



ひじかけ(E) 2



シール(F) 3



蓄便袋(G) 5

便凝固剤(H) 5

持ち運び袋(I) 5

注意

- 便を収容した蓄便袋を可燃ゴミとして処理する場合は市町村の条例に従って下さい。
- 蓄便袋は尖ったものには接触しない様にして下さい。
- 便に異常のある場合は固りにくい事があります。
- 両方のひじかけをもってゆっくりと立ち上がって下さい。
- 湿気の多い所での使用や保管はしないで下さい。
- 便凝固剤は食べられません。
- 幼児の手の届かない所に保管して下さい。

商品名	エコマルⅡ
記号	EMW-2
サイズ	商品:W 54 H85 D45cm (便器の高さ40cm) 外装:W113 H69 D15cm
重量	商品:3.5kg 外装:4.6kg
セット内容	セット部品図を参照
素材	便器:複両面ダンボール ひじかけ:ポリエチレン 便座:複両面ダンボール、ポリエチレン、水性ジェル 蓄便袋:ポリエチレン 持ち運び袋:ポリエチレン 便凝固剤:高分子吸水樹脂、食添用殺菌剤